



Dokumentnamn: Göteborgs Stads rutin för rengöring av PEP/RMT-mask

Beslutad av:
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering

Gäller för:
ÄVO, FFS, SFSV

Datum och för beslutet:
2026-04-22

Dokumentsort:
Rutin

Giltighetstid:
Tillsvidare

Senast reviderad:

Dokumentansvarig:
Medicinskt ansvarig för
rehabilitering

Göteborgs Stads rutin för rengöring av PEP/RMT-mask

Vid rengöring är det viktigt att alla delar ska lufttorka och vara torra innan de sätts ihop igen för att undvika spridning av legionellabakterier.

Rengöring vid långtidsbruk hos enskild patient

En gång/dag

- Plocka isär masken och skölj delarna i varmt vatten.
- Skaka av och lufttorka.
- Sätt ihop masken.

En gång/vecka

- Plocka isär masken och diska alla delar i varmt vatten med diskmedel eller diska i diskmaskinen. Skölj alla delarna noga i rent vatten så att det inte finns några rester av diskmedel kvar.
- Koka därefter alla delar i ca 10 minuter.
- Skaka av och lufttorka.
- Sätt ihop masken.


Om diskdesinfektor finns ska denna användas.

Mellan olika patienter

- Plocka isär masken och diska alla delar i varmt vatten med diskmedel eller diska i diskmaskinen. Skölj alla delarna noga i rent vatten så att det inte finns några rester av diskmedel kvar.
- Koka därefter alla delar i ca 10 minuter.
- Skaka av och lufttorka.
- Sätt ihop masken.

Om diskdesinfektor finns ska denna användas.

Isärplockad PEP-mask

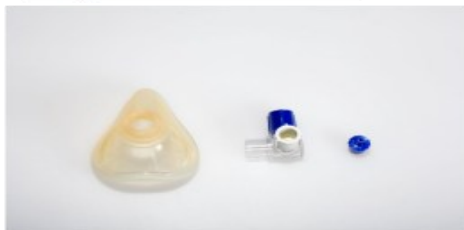

Ihopsatt PEP-mask



Syftet med denna rutin

Säkerställa att rengöring av PEP/RMT-mask sker på rätt sätt, för att minska risken för smitta och infektioner.

Vem omfattas av rutinen

Denna rutin gäller tills vidare för all personal inom ÄVO, FFS och SFSV som hanterar PEP/RMT-mask.